

## UNSERE PERFEKTE VERBINDUNG



WIR DENKEN MOBILITÄT NEU



## MEIN ELEKTRO- ROLLSTUHL



## MEINE LINX- STEUERUNG



## MEINE MYLINX-APP



### Mein bestes Fahrerlebnis: Der innovative *Invacare TDX® SP2* mit *LiNX®*-Steuerung

Der Elektro-Rollstuhl für alle, die eine individuell angepasste Funktionalität brauchen, Wert auf echte Fahrperformance legen und in Stilfragen keine Kompromisse machen: *Invacare TDX SP2*.

- hohe Stabilität im Außenbereich, besonders wendig im Innenbereich
- **LiNX**-Steuerungssystem
- zahlreiche Sondersteuerungen
- intelligentes Sitzsystem
- attraktives Design in vielen Farbkombinationen



### Meine intuitive Bedienung: Die erste Elektro-Rollstuhlsteuerung mit Touchscreen

- Bedienung durch Wischen, Tippen oder über den Joystick.
- einstellbare Helligkeit
- konfigurierbar für Links- oder Rechtshänder
- Handschuh-Modus
- Bildschirmsperre
- Profile und Funktionen sind frei kombinierbar und über Touch Screen, Tasten oder Joystick ansteuerbar
- Mouse-Moover-Funktion zum Bedienen des Computers

Klare Linien, Farbdisplay und eine Bedienung durch Berührung: Das innovative Steuerungssystem „REM400“ wird auf Sie persönlich programmiert – damit alles, von der Sitzfunktion bis hin zum Fahrgefühl, genau zu Ihnen passt.



### Mein digitaler Manager: Die interaktive *MyLiNX*-App

Die **MyLiNX** App – die erste ihrer Art – revolutioniert die Art und Weise, wie Sie mit Ihrem Elektro-Rollstuhl kommunizieren.

Sie verleiht Ihnen volle Kontrolle und jederzeit Auskunft, z.B. über den exakten Batteriestatus. Mit einem Klick können Sie Kontakt zu Ihrem Fachhändler aufnehmen. Entdecken Sie viele weitere Vorteile der Vernetzung mit **MyLiNX**! Detaillierte Informationen finden Sie auf der Rückseite.





# DIGITAL VERNETZT - PERFEKT VERBUNDEN

## Die MyLiNX-App Schritt für Schritt



## Das sagt Ihnen MyLiNX über Ihren Rollstuhl

**1** MyLiNX, die App die Sie mit Ihrem Elektro-Rollstuhl verbindet.

Die MyLiNX-App erscheint als MyLiNX-Symbol auf der Hauptseite Ihres mobilen Endgerätes. Bei der Verwendung von MyLiNX müssen Sie sicherstellen, dass Bluetooth eingeschaltet ist.

**2** Öffnen Sie die MyLiNX-App, um sie mit Ihrem Elektro-Rollstuhl zu verbinden.

Der MyLiNX-Startbildschirm zeigt solange keine Informationen, bis er mit dem Rollstuhl verbunden ist.

Klicken Sie auf "Hier tippen, um Verbindung herzustellen" in der linken unteren Ecke des Bildschirms, um zur Einstellungsseite zu gelangen. Wählen Sie das Fahrpult Ihres Elektro-Rollstuhls anhand der Seriennummer aus (z.B. REM-KXXXXXXX).

Die App verbindet sich mit dem gewählten Rollstuhl und die Seriennummer des Fahrpults wird in der unteren linken Ecke des Bildschirms angezeigt. Durch Tippen auf diese Seriennummer gelangen Sie auf die Diagnoseseite des Rollstuhls.

Nachdem eine erste Verbindung hergestellt wurde, wird sich die App immer dann automatisch mit diesem Fahrpult verbinden, wenn Sie sich im Bluetooth-Bereich des eingeschalteten Rollstuhls befindet.

**3** Klicken Sie auf "Mehr", um zu den Menübereichen Diagnose und Einstellungen zu gelangen.

Hier können Sie Daten Ihres Elektro-Rollstuhls aktualisieren und auf weitere App-Seiten zugreifen.

**4** Anhand des Verbindungssymbols in der rechten unteren Ecke des Bildschirms können Sie erkennen, ob die App derzeit über Bluetooth mit Ihrem Rollstuhl verbunden ist.

Die Daten können nur aktualisiert werden, wenn die App und der Rollstuhl miteinander verbunden sind.



**5** Sobald die Daten von Ihrem Elektro-Rollstuhl abgerufen worden sind, werden sie auf der Startseite und auf den Infoseiten der App angezeigt.

Tippen Sie einfach auf die Übersichtsdiagramme der Startseite. Die dargestellten Informationen basieren auf den aktuellsten Daten.

**6** **Batterieladung**

Auf dieser Seite sehen Sie den aktuellen Batterieladestand. Außerdem erhalten Sie Informationen zu den Ladezyklen, früheren Statusmeldungen der Batterie und der durchschnittlichen Ladespannung.



**7** **Batterienutzung**

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen und Empfehlungen, wie Sie Ihre Batterie optimal nutzen.



**8** **Fahrzeit**

Unter "Fahrzeit" sehen Sie den Prozentsatz der Fahrzeit im Verhältnis zu dem Zeitraum, in dem der Rollstuhl eingeschaltet war. Außerdem erfahren Sie, wie lange der Rollstuhl insgesamt in Betrieb war, wie lange er gefahren wurde und wie hoch der Anteil der Fahrzeit bei maximaler Leistung ist.



## Sie behalten jederzeit die Kontrolle

**9** Wenn Sie "Mehr" auswählen, wird Ihnen das App-Menü angezeigt.

Von diesem Menü aus können Sie auf weitere Diagnose- und Einstellungsseiten zugreifen.

**10** **Diagnose**

Durch das Tippen auf die Seriennummer des Fahrpults in der linken unteren Ecke sehen Sie die Systemmodule, die aktuell in Ihrem Elektro-Rollstuhl verbaut sind, die dazugehörigen Seriennummern und Software-Versionen. Außerdem erhalten Sie Informationen über den Systemstatus einschließlich eventueller Fehlermeldungen.



**11** **Tipps und Hinweise**

Unter "Mehr" bei "Tipps und Hinweise" erhalten Sie Empfehlungen zur Pflege Ihres Elektro-Rollstuhls, zur Verwendung der App und wie man eine stabile Verbindung mit dem Rollstuhl herstellt.



**12** **Einstellungen**

Sobald der Elektro-Rollstuhl, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll, ausgewählt wurde, zeigt die Einstellungsseite die Seriennummer des gewählten Fahrpults an.


Um die Verbindung mit diesem Rollstuhl zu trennen, tippen Sie bitte in den Einstellungen auf "Mehr", "Einstellungen", "Seriennummer". Alle Daten werden aus der App getrennt. Die Kontaktdaten des Fachhändlers können unter den "Einstellungen" hinterlegt und bearbeitet werden. Angezeigt werden Sie auf der Diagnose-Seite.



## Hilfe per Klick

**13** Ihr Rollstuhl und Ihr Smartphone sind Ihre treuen Begleiter. Umso besser, wenn Ihr Smartphone Sie darauf hinweist, wenn irgendetwas nicht passt.

Sollte Ihr Elektro-Rollstuhl durch eine Störung beeinflusst sein, erscheint dies als auffällig gekennzeichnete Warnhinweis in der MyLiNX-App auf Ihrem Smartphone.

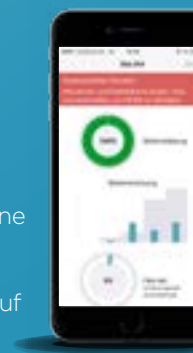

**14** Der Hinweis informiert Sie über das Problem und enthält meist Handlungsempfehlungen. Mit einem Klick können Sie diesen Hinweis aus der App per E-Mail an Ihren Fachhändler schicken. Aufgrund der beim Fachhändler hinterlegten Daten kann dieser Ihnen sogar per Telefon erste Tipps geben.



## KOSTENLOSER DOWNLOAD

vom Apple App Store und Google Play Store



Alle Informationen online auf:

[www.invacarelinx.com](http://www.invacarelinx.com)  
[www.invacareUlm.com](http://www.invacareUlm.com)

Invacare GmbH  
Alemannenstraße 10  
88316 Isny  
Deutschland  
Telefon +49 7562 700-0  
Fax +49 7562 700-66  
E-Mail kontakt@invacare.com  
Web www.invacare.de

Invacare Austria GmbH  
Herzog-Odilo-Straße 101  
5310 Mondsee  
Österreich  
Telefon +43 6232 553-50  
Fax +43 6232 553-54  
E-Mail info-austria@invacare.com  
Web www.invacare.at

Invacare AG  
Benkenstrasse 260  
4108 Witterswil  
Schweiz  
Telefon +41 61 48770-80  
Fax +41 61 48770-81  
E-Mail switzerland@invacare.com  
Web www.invacare.ch

© 2017 Invacare International Sàrl. Alle Rechte vorbehalten. Die Angaben entsprechen bei Drucklegung dem aktuellsten Stand. Technische Änderungen unserer Produkte behalten wir uns vor. Stand 08/2017 Art.-Nr. 1606709



Yes, you can.

