



Montage des cales-troncs du Clématis, dossier Laguna

Outillage : l'ensemble du montage s'effectue avec la clé BTR située derrière le coussin de dossier

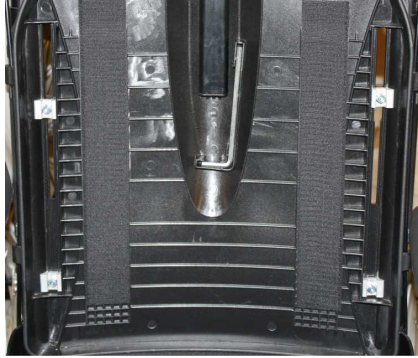

Montage :


1. Dévisser les éclisses de fixation à l'arrière du dossier, **la pièce aluminium servant d'écrou à l'intérieur de la coque de dossier ne sera pas utilisée pour la suite du montage**

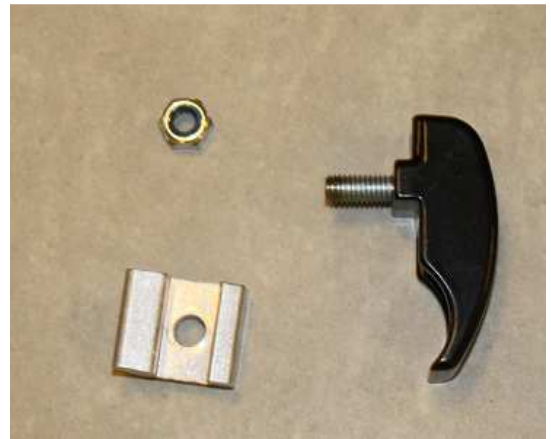

2. Placer le rail livré avec le cale-tronc dans son logement à l'intérieur de la coque de dossier. Attention si vous avez une paire de cale-tronc **le rail droit est différent du rail gauche**. Le rail doit parfaitement s'intégrer à la coque (il ne doit pas être de biais dans son logement), la fente de réglage en hauteur doit être vers le haut.



3. Fixer le support du cal-tronc en plaçant la plaque percée de trous filetés à l'intérieur de la coque de dossier

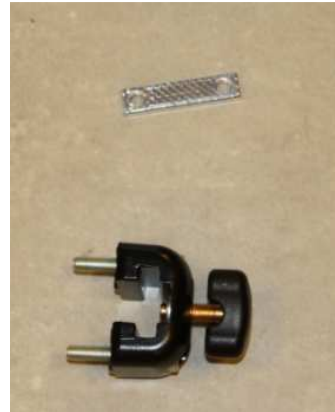

4. Remonter les éclisses inférieures et supérieures. La position de l'éclisse supérieure peut varier fonction de la hauteur du cale-tronc. L'éclisse peut être positionnée plus haute ou plus basse que le support de cale-tronc.

