

# Version Etude Medley Low. Additif au guide Etude Medley.

## Illustration 8

Version Medley Low (mm)		
	Position basse	Position haute
A	2215	
B	1020	
C	220-620	290-690
D	1455-1855	1525-1925
E	750	
F	350	
G	340	
H	560	

### 1. Généralités

Nouvel Avertissement: avec la version Etude Medley Low, tout obstacle au sol doit être inférieur à 5 mm. Ne pas déplacer le lit en position basse, il y a un risque d'interférence entre un possible obstacle au sol et les moteurs.

### 2b. Etude Medley

B) Une paire de panneaux de lit Low: MEDLEY.1535236.M1

#### Référence:

#### Panneaux de lit:

MEDLEY.1535236.M1      Panneaux de lit Etude Medley Low (une paire)

### 4. Montage des accessoires

#### Montage des barrières de lit Etude Medley

9) Avec la version Etude Medley Low, merci d'apposer les 4 autocollants "Avertissement" (fournis) aux 4 extrémités du lit comme indiqué sur le schéma ci-contre .

Les 4 autocollants "Avertissement" sont joints à l'emballage Des panneaux de lit.



Nouvel Avertissement: Il y a un risque de coincement du pied entre le sol et la partie inférieure de la barrière lorsque le plan de couchage et la barrière sont dans la position la plus basse.